

**Art. 6151 - Cintura addominale - chiusura di sicurezza – idrorepellente
ignifugato 1 IM / blu**

Codice Articolo	6151
Misura	Taglia unica, regolabile
N°. Repertorio	1415654
Codice CND	Y122499



Caratteristiche

Ausilio idrorepellente realizzato per il mantenimento del paziente con ridotta capacità motoria in posizione seduta e per la prevenzione di cadute e scivolamenti. Il corpo del dispositivo è ignifugo: classe 1.

Impiego

Dispositivo destinato esclusivamente al posizionamento nella zona addominale, completo di chiusura di sicurezza. Idoneo per impiego esclusivamente con sedie e carrozzine. Non applicabile ad altre parti del corpo.

Target

Reparti di degenza, lungodegenza, case protette, RSA, sanitarie, privati.

Controindicazioni

Dispositivo non adatto per pazienti agitati, psichiatrici, aggressivi, combattivi e con propensione al suicidio. Non adatto per pazienti affetti da BPCO (broncopatie cronico ostruttive), con stomie (colostomizzati), tubi di drenaggio, ferite post-chirurgiche. L'ausilio non è da utilizzare con pazienti allettati.

Avvertenze

Lavabile in acqua tiepida max 40 °C con saponi neutri, non è necessario stirare. Evitare contatto con sostanze infiammabili volatili, solventi, benzina ed altri prodotti simili. La mancata osservanza delle indicazioni citate può causare un uso improprio del prodotto.

Stoccaggio

Proteggere dall'umidità e dall'esposizione diretta ai raggi solari. Conservare a temperatura ambiente.

Caratteristiche Tecniche

Materiale Impiegato	Tessuto esterno: poliammide 92% (UNI 9177 Classe 1) Strato interno: poliuretano espanso 8% (UNI9175 Classe 1 IM) Cintura: nastro in polipropilene 100% Clip fissaggio: in plastica, con chiusura di sicurezza
Finitura	Cucitura
Pulizia	Lavabili a max. 40°C con acqua e saponi neutri
Dimensione corpo addominale	ART_ 6151 Lunghezza max cm 41 - altezza max cm 14 - cintura regolabile per circonferenza da min. 93 cm a max 151cm - altezza 5 cm
Confezionamento:	1 pezzo

Modo d'Uso



- Posizionare la cintura sul paziente avendo cura di porre la porzione addominale in una posizione confortevole al paziente.
- Collocare le cinghie della porzione addominale in posizione confortevole e farle passare sotto i braccioli della sedia a rotelle per poi condurle verso lo schienale della sedia stessa.
- Controllare periodicamente il corretto posizionamento del dispositivo e la corretta postura del paziente.

LATEX FREE

Dispositivo Medico di Classe I

Coremec S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento, di apportare modifiche o migliorie ai prodotti senza modificarne la sostanza. Coremec S.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l'uso improprio delle informazioni riportate.

COREMEC s.r.l

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale
Corso Vittime del Lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)
Tel. +39 011-35.89.481 r.a. - Fax +39-011-35.89.483

www.coremec.it

e-mail: coremec@coremec.it



COREMEC s.r.l.
Export Department
e-mail: export@coremec.it

Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti
ST6151_ Edizione _r0_2016