

Art. 6700 - Cintura addominale

Codice Articolo	6700
Misura	===
N°. Repertorio	1219959
Codice CND	Y180999

Caratteristiche

Ausilio realizzato per il mantenimento del paziente in posizione seduta, per la prevenzione di cadute e scivolamenti. Da usare esclusivamente con idonee sedie e carrozzine.

Impiego

Dispositivo destinato esclusivamente al posizionamento nella zona addominale. Non applicabile per limitare altre parti del corpo.

Target

Reparti di degenza, lungodegenza, case protette, RSA.

Stoccaggio

Proteggere dall'umidità e dall'esposizione diretta ai raggi solari. Conservare a temperatura ambiente.

Controindicazioni


Dispositivo non adatto per pazienti agitati, psichiatrici, aggressivi, combattivi e con propensione al suicidio. Non adatto per paziente affetti da BPCO (broncopatie cronico ostruttive), con stomie (colostomizzati), tubi di drenaggio, ferite post-chirurgiche.

L'ausilio non è da utilizzare con pazienti allettati.

Caratteristiche Tecniche	
Materiale Impiegato	Cotone, foam, bandella rinforzata, profilo colorato, filo, chiusura in nylon
Finitura	Cucitura
Pulizia	Lavabili a max. 40°C con acqua e saponi neutri
Dimensione Fascia addominale	cm 65 x 18

Confezione: pezzo singolo

Modo d'Uso

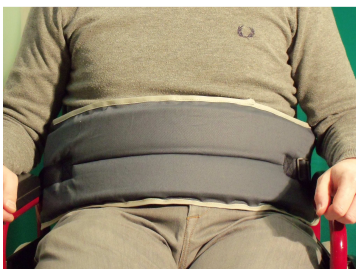

Posizionare la cintura sull'addome del paziente

Portare le cinghie di fissaggio posteriormente sullo schienale della carrozzina



Regolare la lunghezza della cinghia e procedere alla chiusura tramite la fibbia a scatto

LATEX FREE

Dispositivo Medico di Classe I

DEA s.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale

C.so Vittime del Lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)

Tel. +39-011-35.89.478 r - Fax +39-011-35.89.479

Website: www.deatorino.it e-mail: info@deatorino.it

DEA s.r.l.

Export Department

e-mail: export@deatorino.it

La mancata osservanza delle indicazioni riportate può causare un uso improprio del prodotto.

La Dea S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento, di apportare modifiche o migliorie ai prodotti senza modificarne la sostanza.

La Dea S.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l'uso improprio delle informazioni riportate.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti

ST 6700_ Edizione _r1_2014