

MATERASSO ANTIDECUBITO IN FIBRA CAVA SILICONATA



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Materasso antidecubito formato da 12 cilindri/contenitore di TNT (poliestere 100) traspirante contenente fibra cava siliconata HCS e inseriti in una fodera in cotone verde.

Caratteristiche funzionali:

- Ha ottime prestazioni e una grande facilità d'uso.
- Può essere lavato senza alterarne caratteristiche e proprietà
- La divisione in elementi garantisce una imbottitura uniforme grazie alla quale le pressioni vengono perfettamente ripartite
- La fibra cava è siliconata per permettere un ritorno dopo la compressione il più costante possibile nel tempo
- I materassi sono forniti di 2 lembi di fissaggio da rimboccare al materasso standard

Dimensioni esterne:

Lunghezza 195 cm

Larghezza 85 cm

Spessore 20 cm circa

N.B. disponibili dimensioni personalizzate

Sicurezza e rischi per la salute:

- Non si rilevano parti a rischio né per il paziente né per l'operatore trattandosi di prodotto imbottito.
- I materiali utilizzati non presentano rischi per la salute delle persone esposte.

Manutenzione:

Lavabile in acqua calda alla massima temperatura a 60° C. Sterilizzabile a raggi ultravioletti. E' assolutamente vietato il lavaggio con diluenti e trieline. Non centrifugare. Non stirare i cilindri di fibra cava. La fodera si può stirare solo privata dei cilindri imbottiti. Temperature di asciugatura massima a 70° per due/tre ore in ambienti ben ventilati.

Funzioni primarie:

Ausilio antidecubito idoneo all'utilizzo come sopramaterasso su letti normali. Assicura una pressione di contatto tale da limitare i rischi di decubito in soggetti a ridotta mobilità. In virtù delle sue capacità di deformarsi a fronte delle sollecitazioni dovute a movimenti del paziente. Diminuisce i rischi di attrito e forze di taglio. Assicura una permeabilità all'aria evitando i danni causati dall'occlusione capillare prolungata.



MATERASSO ANTIDECUBITO IN FIBRA CAVA SILICONATA

Requisiti essenziali del prodotto:

Sacche in tessuto traspirante contenente fibra con valori di drenaggio alti e costanti. Fibra cava con un'ideale resilienza. Siliconata in filo per evitare l'ammassamento e mantenere costante le caratteristiche di elasticità. Divisione in cilindri per evitare spostamenti della fibra. Quantità idonea per consentire la penetrazione delle preminenze ossee evitando il fenomeno Bottom-Out. Fodera lavabile e traspirante.

DESTINAZIONE D'USO

Serve a prevenire lesioni da decubito in pazienti a basso rischio costretti a letto per lunghi periodi.

GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
94009090	Materasso in fibra cava siliconata cm. 195x85 h.20 con 12 inserti fissi	2379093	V080702

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia
-------------	---

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017
-------------------------------	---