

Ausili antidecubito in fibra cava siliconata

Codice Articolo	MT.01.CC	CS.04	CS.05	CS.06	CS.07	CVL.01	PT.05	PT.06	PT.07
Misura	Cm 195 x 85 x 18	Cm 45 x 45	Cm 45 x 45	Cm 45 x 45	Cm 45 x 60	Cm 33	Cm 35	Cm 30	Cm 32
N°. Repertorio	2737951	2737946	2737947	2737948	2737949	2737950	2737955	2737956	2737952
Codice CND	V080702	V08030102					V0811		
UDI-DI	18053307 530540	18053307 530588	18053307 530595	18053307 530601	18053307 530618	18053307 530625	18053307 530670	18053307 530687	18053307 530694

Descrizione e definizione del prodotto:

L'interno dei nostri prodotti è composto da fibra cava siliconata il cui scopo è quello di proteggere comodamente il paziente fornendogli un eccellente effetto "cuscino" ed eliminando, grazie all'agente lubrificante di cui sono composti, i possibili attriti tra la parte del corpo interessata e la parte del materassino/cuscino. La fibra in silicone non assorbe né acqua né le urine; può essere lavata ad acqua e a secco ed asciugata all'ombra per il suo immediato riutilizzo.

Caratteristiche ed indicazioni d'uso:

eccellente riduzione delle pressioni; isolamento contro il caldo e il freddo; alta traspirabilità e riduzione del surriscaldamento; lavabile e riutilizzabile, di rapida asciugatura; radiotrasparente ed ipoallergenico. Prevenzione delle piaghe da decubito e comfort posturale.

Specifiche delle materie prime impiegate nel prodotto finito

Tessuto esterno: cotone 100% sanforizzato. Il prodotto non soggetto a restringimento nemmeno se lavato ad acqua o a secco con acqua tiepida. È proprio grazie a tale tipo di copertura che in inverno, con le basse temperature, non si sentirà il freddo quando la Vs. pelle toccherà il prodotto.

Imbottitura interna: la parte interna contiene decine di milioni di fibre cave siliconate le quali hanno il compito di mantenere le proprietà di elasticità e morbidezza in modo tale da garantire al paziente posizioni confortevoli. Anche questo non assorbe acqua né altre escrezioni.

Cucitura: tramite filo al 100% in nylon con doppia rifinitura per eliminare la possibilità che si verifichino tagli o che il prodotto si sleggi.

Posizionamento e/o fissaggio: tramite fascette in velcro, ove previsto e necessario.

Articoli disponibili

CS.04	Cuscino con foro, lacci di fissaggio in velcro, cm 45 x 45
CS.05	Cuscino con ribasso centrale, lacci di fissaggio in velcro, cm 45 x 45
CS.06	Cuscino a 3 sezioni, lacci di fissaggio in velcro, cm 45 x 45
CS.07	Cuscino schiena a 4 sezioni, lacci di fissaggio in velcro, cm 45 x 60
CVL.01	Cuscino a collare per supporto cervicale
MT.01.CC	Materasso con 12 tubolari, uso ospedaliero e domiciliare, cm 195 x 85 x 18
PT.07	Talloniera, con lacci di fissaggio in velcro
PT.06	Gomitiera, con lacci di fissaggio in velcro
PT.05	Protezione per gomito/tallone, con laccio di fissaggio in cotone e velcro

Istruzioni per l'uso e la manutenzione del prodotto

Modalità di utilizzo: *gomitiere* e *talloniere* devono essere indossate dal paziente per prevenire le piaghe da decubito del distretto anatomico specifico; si raccomanda di posizionare correttamente i dispositivi regolando il sistema di chiusura a velcro, ove previsti, evitando compressioni sui tessuti cutanei.

I *collari* svolgono un'ottimale azione di supporto e di stabilizzazione nel posizionamento della testa del paziente a letto o su carrozzina. I *cuscini* possono essere utilizzati su vari supporti di seduta e carrozzina.

I *materassi (sovrasmaterassi)* con la suddivisione in settori multipli, permettono la stabilizzazione della fibra cava, una maggiore areazione dei punti d'appoggio e sono ideali per pazienti con peso sino a 80kg

Istruzioni di lavaggio: è possibile effettuare sia il lavaggio a secco che in acqua tiepida con saponi neutri a temperature mai superiori a 40 °C; è sconsigliato candeggiare e centrifugare. Asciugare in ambiente fresco e all'ombra o con asciugatrici a temperature mai superiori a 40 °C. Non è necessario l'uso del ferro da stiro. Il produttore non risponde di eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche dell'ausilio in caso di mancata osservanza delle indicazioni di lavaggio.

Attenzione: assolutamente vietato il contatto con sostanze infiammabili volatili, solventi, benzina, ed altri prodotti simili. In relazione alla reazione al fuoco, i dispositivi non sono ignifughi. Si consiglia l'utilizzo secondo le indicazioni fornite dal personale medico e paramedico.

Conservazione e smaltimento: i dispositivi in fibra cava siliconata devono essere conservati in posizione orizzontale al riparo da fonti di luce, calore ed umidità. A seguito di usura o danneggiamento, possono essere considerati come rifiuto non pericoloso ed essere smaltiti con modalità ordinaria.

L'utilizzatore e/o paziente sono tenuti a segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione ai dispositivi a COREMEC s.r.l. e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o paziente è stabilito.

Nel caso dell'Italia le segnalazioni vanno fatte pervenire al Ministero della Salute.

La mancata osservanza delle istruzioni può causare un uso improprio del prodotto.

COREMEC s.r.l. si riserva il diritto di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per qualsiasi uso improprio delle informazioni riportate

COREMEC s.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale

C.so Vittime del Lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)

Tel. +39 011-35.89.481 r.a. - Fax +39-011-35.89.4

www.coremec.it

e-mail: coremec@coremec.it

**COREMEC s.r.l.**

Export Department

e-mail: export@coremec.it

Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti - ST fibra cava_b - Revisione 01 - Gennaio 2025