

MOPEDIA®

MA RC22x_RC23x_RC24x_RC25x 02 A_01-2017

SEDIE COMODE

MANUALE DI ISTRUZIONI

INDICE

1. CODICI	pag.3
2. INTRODUZIONE.....	pag.3
3. DESTINAZIONE D'USO.....	pag.3
4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE	pag.3
4.1 Regolazione pedane.....	pag.4
5. AVVERTENZE GENERALI	pag.4
6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA.....	pag.4
7. DESCRIZIONE GENERALE.....	pag.4
7.1 VISTA ed elenco delle parti	pag.4
8. MONTAGGIO/SMONTAGGIO	pag.5
8.1 Montaggio	pag.5
8.2 Smontaggio	pag.5
9. PRIMA DI OGNI USO	pag.5
10. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO.....	pag.5
11. MODALITÀ D'USO.....	pag.6
11.1 Salire sulla sedia comoda	pag.6
11.2 Scendere dalla sedia comoda.....	pag.6
11.3 Scalini e dislivelli (consigli per affrontarli al meglio)	pag.6
11.4 Regolazione delle pedane	pag.7
11.5 Regolazione dello schienale per i modelli RC225-xx,RC230-xx, RC240-xx, RC245-xx	pag.7
11.6 Regolazione dello schienale per i modelli RC250-xx	pag.7
11.7 Freni	pag.7
11.8 Ruote	pag.8
11.9 Braccioli	pag.8
11.10 WC	pag.8
11.11 Utilizzo.....	pag.8
12. MANUTENZIONE.....	pag.9
13. PULIZIA E DISINFEZIONE.....	pag.9
13.1 Pulizia	pag.9
13.2 Pulizia del WC	pag.9
13.3 Disinfezione.....	pag.9
14. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO GENERALI.....	pag.10
15. CARATTERISTICHE TECNICHE	pag.10
15.1 Dimensioni e peso.....	pag.10
15.2 Specifiche tecniche	pag.12
16. PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI	pag.12
17. GARANZIA	pag.12
18. RIPARAZIONI	pag.13
18.1 Riparazione in garanzia	pag.13
18.2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia	pag.13
18.3 Prodotti non difettosi	pag.13
19. RICAMBI	pag.13
20. CLAUSOLE ESONERATIVE	pag.13

CE Dispositivo medico di classe I D. Lgs 24/02/97 n. 46
attuazione della direttiva CEE 93/42 e successive modifiche

1. CODICI

RC221-xx*	Sedia comoda con schienale non regolabile, ruote Ø125mm
RC225-xx*	Sedia comoda con schienale regolabile, ruote Ø125mm
RC230-xx*	Sedia comoda con schienale regolabile, ruote Ø200mm
RC240-xx*	Sedia comoda con schienale regolabile, ruote posteriori Ø600mm
RC245-xx*	Sedia comoda con schienale regolabile, ruote frontali Ø600mm
RC250-xx*	Sedia comoda con schienale regolabile servo assistito, ruote Ø200mm

***xx** corrisponde alla larghezza della seduta e del relativo schienale di dimensioni:
(38-40-43-46-48-50-55) cm

2. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto una sedia comoda della linea MOPEDIA by Moretti. Le sedie comode MOPEDIA by Moretti sono state progettate e realizzate per soddisfare tutte le vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare la sedia comoda da voi acquistata. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

Nota Controllare che tutte le parti del prodotto non abbiano subito danni durante la spedizione. In caso di danni non utilizzare il prodotto e contattare il rivenditore per ulteriori istruzioni.

3. DESTINAZIONE D'USO

Le sedie comode MOPEDIA sono destinate al trasporto ed alla mobilità di persone con difficoltà motorie in ambienti interni: presso enti, strutture di tipo ospedaliero e/o assistenziale sanitario o in ambito domiciliare.

ATTENZIONE!



- E' vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.
- Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Moretti S.p.A. dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto fabbricato ed immesso nel commercio dalla stessa Moretti S.p.A. e facente parte della famiglia Sedie Comode è conforme alle disposizioni applicabili della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici e successive modifiche. A tal scopo Moretti S.p.A. garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall'allegato I della direttiva 93/42/CEE come prescritto dall'allegato VII della suddetta direttiva.
2. L'elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell'allegato A della dichiarazione.
3. I dispositivi in oggetto **NON SONO STRUMENTI DI MISURA.**
4. I dispositivi in oggetto **NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.**
5. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione **NON STERILE.**
6. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I.

7. **NON È CONSENTITO** utilizzare e/o installare i dispositivi in oggetto al di fuori della destinazione d'uso prevista dalla Moretti S.p.A.
8. La Moretti S.p.A. mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche.

4.1 Norme e direttive di riferimento

I Test di sicurezza prescritti dalla norma UNI EN 12182 sono stati eseguiti e superati.

5. AVVERTENZE GENERALI


- Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente manuale
- Per un utilizzo corretto del dispositivo consultare sempre il vostro medico o terapeuta
- Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili
- Prestare sempre molta attenzione alla presenza di bambini.
- Non sollevare la sedia comoda da parti amovibili (Braccioli, schienale, ecc) che potrebbero accidentalmente staccarsi durante il sollevamento.

6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA

	Codice prodotto
	Marchio CE
	Produttore
	Mese e anno di produzione
	Smaltimento
	Leggere il manuale per le istruzioni
	Portata max

7. DESCRIZIONE GENERALE

7.1 Vista ed elenco delle parti

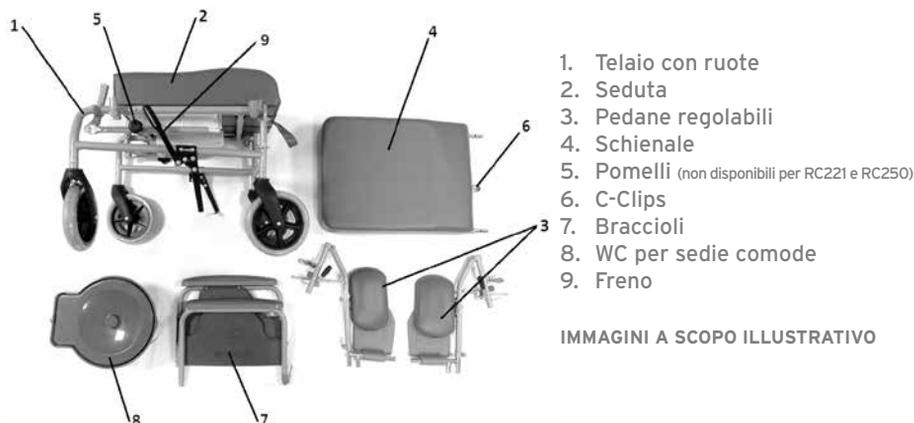

IMMAGINI A SCOPO ILLUSTRATIVO

8. MONTAGGIO/SMONTAGGIO

8.1 Montaggio

Disimballare il prodotto e verificare che il contenuto corrisponda alla descrizione illustrativa delle parti. Tutte le sedie comode MOPEDIA vengono fornite con schienale, braccioli e pedane smontate.

- Per il montaggio dello schienale è sufficiente infilare le due estremità dei tubi nelle apposite aperture previste nella parte posteriore della sedia (FIG. 2).
- A quel punto fissare lo schienale inserendo i perni a C-clip (FIG. 3).
- I braccioli devono essere inseriti negli alloggiamenti laterali avendo cura di inserire contemporaneamente le due diverse estremità. Assicurarsi che il bracciolo sia fissato correttamente (FIG.4).



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4

- Le pedane regolabili devono essere inserite all'esterno della sedia comoda inserendo nei due perni la parte superiore della pedana (FIG. 5). Attenzione ad individuare correttamente quale pedana utilizzare. I poggiatesta devono essere sempre all'interno della sedia comoda. Per fissare la pedana assicurarsi che la leva di bloccaggio sia ben fissata all'interno della sedia comoda (FIG.6).



FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7

- Inserire la tazza WC dalla parte posteriore della sedia facendo attenzione ad inserirla correttamente nelle guide previste (FIG.7).

IMMAGINI A SCOPO ILLUSTRATIVO

8.2 Smontaggio

- Eseguire il procedimento appena descritto nel senso inverso.

9. PRIMA DI OGNI USO

- Verificare sempre lo stato di usura delle parti meccaniche in gioco così da garantire un utilizzo del dispositivo in totale sicurezza per persone e cose;
- Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo con particolare attenzione al corretto inserimento delle ruote e di tutti i componenti e degli accessori* (optional);
- Verificare il corretto funzionamento del freno sulle ruote.

10. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO

- Non superare per nessun motivo la portata massima ammessa;
- Non inclinare la sedia comoda più del 10% senza assistenza;

- Bloccare completamente le ruote della Sedia ogni volta che il paziente viene trasferito oppure quando si trova in ascensore;
- Prima di trasferire il paziente dalla/sulla sedia comoda, assicurarsi che la sedia sia posta su una superficie piana e stabile e con le ruote bloccate;
- Prima di inclinarsi in avanti o di alzarsi dalla sedia assicurarsi che le ruote anteriori siano dritte e quelle posteriori siano bloccate, per evitare un possibile ribaltamento;
- Per evitare un possibile ribaltamento evitare di sporgersi sul retro oltre lo schienale della sedia;
- Se dovete prendere un oggetto posto dietro la sedia, non sporgetevi oltre la lunghezza del vostro braccio, senza modificare la vostra posizione sulla sedia;
- Fate attenzione che gli abiti non si impiglino nelle ruote della sedia comoda;
- Durante il montaggio e/o la regolazione di pedane, schienale e supporti per le gambe o comunque durante l'utilizzo della sedia utilizzare la massima attenzione onde evitare schiacciamenti accidentali delle dita;
- Tenere la sedia lontana da fonti dirette di calore.
- Assicurarsi che la vaschetta non sia stata spostata o rimossa;
- Non appoggiarsi sulle pedane per sedersi o scendere dalla comoda;
- Non sporgersi dalla comoda per prendere oggetti su mobili o su altri piani;
- Evitare di sedersi sul bordo per evitare che la comoda si possa ribaltare.

11. MODALITÀ D'USO

Nota: Fare riferimento alle avvertenze generali e per l'uso di questo manuale istruzioni

ATTENZIONE!



- Salire e scendere da soli dalla sedia comoda è un'operazione potenzialmente pericolosa: fatelo solo se fisicamente in grado e con cautela;
- Non appoggiarsi sulle parti amovibili, preferire il telaio della seduta;
NON GRAVARE IL PESO SUI POGGIAPIEDI DURANTE LA SALITA O LA DISCESA DALLA SEDIA COMODA, PERICOLO DI RIBALTAMENTO!!!

11.1 Salire sulla sedia comoda

1. Avvicinare la sedia il più possibile in modo da posizionarla di fianco a voi
2. Bloccare i freni delle ruote posteriori; per agevolare al massimo la salita sulla sedia comoda si consiglia di togliere il bracciolo dal lato dove si effettuano queste operazioni
3. Appoggiarsi alla struttura del telaio facendo forza sulle braccia, dunque scendere lentamente verso la seduta

11.2 Scendere dalla sedia comoda

1. Avvicinarsi il più possibile a fianco di una nuova seduta
2. Bloccare i freni delle ruote posteriori; per agevolare al massimo la discesa dalla sedia si consiglia di togliere il bracciolo dal lato dove si effettuano queste operazioni
3. Appoggiare le braccia al telaio della seduta sulla quale ci si deve trasferire e sollevandosi scivolare lentamente verso quest'ultima

11.3 Scalini e dislivelli (consigli per affrontarli da soli al meglio)



ATTENZIONE!

- Queste tecniche sono valide solo per utilizzatori esperti di sedie comode ad autopinta. In tutti gli altri casi si raccomanda di farsi aiutare da un'assistente!



ATTENZIONE!

- Si raccomanda di non utilizzare questa tecnica in presenza di un dislivello superiore ai 10 cm!

SALIRE: Portarsi in corrispondenza del bordo del marciapiede o dello scalino da superare. Bilanciare la carrozzina sulle ruote posteriori in modo da sollevare le ruote anteriori quanto basta per appoggiarle sull'ostacolo da superare. Inclinare il busto in avanti e spingere

energicamente in avanti il corrimano presente sulle ruote posteriori. Continuare a spingere finché le ruote posteriori non siano salite sopra l'ostacolo.

SCENDERE: Per scendere il dislivello eseguire la procedura inversa. Posizionarsi con la parte posteriore della carrozzina davanti al dislivello da superare, trattenere energicamente il corrimano delle ruote posteriori quindi scendere lentamente il gradino oppure l'ostacolo; successivamente bilanciare la carrozzina sulle ruote posteriori in modo da sollevare leggermente le ruote anteriori e terminare delicatamente la discesa.

11.4 Regolazione delle pedane

- Le pedane delle sedie comode possono essere regolate secondo l'altezza che offre il miglior comfort allentando la vite (FIG. 8) e comunque ad una altezza dal pavimento non inferiore ai 6,5 cm. Controllare sempre che le due pedane siano alla stessa altezza.



FIG. 8



FIG. 9

- Per la regolazione del supporto per la gamba delle pedane elevabili in altezza, ruotare lo stesso, verso l'esterno e scegliere una delle tre posizioni previste, riportare quindi lo stesso in posizione originaria facendo attenzione al suo corretto bloccaggio (FIG.9). Per l'elevazione in altezza alzare la pedana, nel caso in cui si desideri abbassare la pedana premere prima la leva posta sull'esterno della pedana e poi abbassare la stessa (FIG. 10).

11.5 Regolazione dello schienale per i modelli RC225-XX, RC230-XX, RC240-XX, RC245-XX



FIG. 10



FIG. 11

- Per la regolazione dello schienale allentare i due pomelli di colore nero posti nelle due parti laterali (FIG.11), spingere lo schienale fino a raggiungere l'inclinazione desiderata e stringere nuovamente i due pomelli. I modelli hanno uno schienale regolabile a molla che torna in posizione verticale. Si ricorda comunque di stringere bene i pomelli di bloccaggio posti sulla parte laterale della sedia comoda.

11.6 Regolazione dello schienale per i modelli RC250-XX

- Per la regolazione dello schienale agire tramite le leve poste sul telaio dello schienale. Si consiglia la collaborazione di un altro operatore.



FIG. 12

11.7 Freni

Bloccare le ruote della sedia prima di salire, scendere, allungarsi avanti oppure prendere l'ascensore. Sui modelli a ruote piccole (RC221-xx) i freni vengono azionati premendo la leva posta su tutte le ruote della sedia (FIG. 12). Su gli altri modelli il freno viene attivato agendo sulla leva fino a fine corsa (FIG. 13 e 14). Se regolata correttamente, la leva del freno deve stringere bene la ruota cioè deve penetrare di circa 5 o 6 mm la gomma. In caso contrario verificare la pressione dei pneumatici. In caso di necessità regolare i freni allentando il dado di bloccaggio

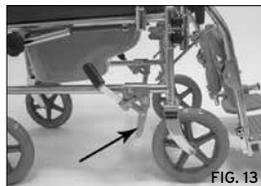


FIG. 13



FIG. 14

utilizzando la chiave in dotazione e fare scorrere il morsetto in avanti o indietro secondo le necessità. Fissare bene il dado di bloccaggio.

IMMAGINI A SCOPO ILLUSTRATIVO



FIG. 15



FIG. 16

11.8 Ruote

Le ruote devono essere periodicamente controllate e lubrificate se necessario. Rimuovere la forcella svitando il bullone e lubrificare il perno (FIG. 15).

Rimuovere anche la ruota dalla forcella e lubrificare i perni. Assemblare di nuovo la ruota

e la forcella stringendo bene le viti finché non rimanga nessun gioco, le ruote devono girare liberamente. Nei modelli RC240 e RC245 le ruote grandi Ø600mm devono essere controllate periodicamente e non devono oscillare. In caso di oscillazione della ruota, stringere leggermente il dado del perno (FIG. 16). Per testare la ruota inclinare su di un lato la sedia comoda e far girare la ruota. Le ruote non necessitano di gonfiaggio e non presentano il problema della foratura perché sono ruote piene.

11.9 Braccioli



FIG. 17

Per facilitare il trasporto della sedia comoda ed i trasferimenti del paziente tutti i braccioli delle carrozzine sono completamente estraibili e ribaltabili. Per estrarre i braccioli tenere premuto il pulsante anteriore e posteriore posto alla base del bracciolo e sollevare lo stesso (FIG. 17). Per il montaggio eseguire la stessa operazione facendo attenzione al perfetto bloccaggio del pulsante.

11.10 WC



FIG. 18



FIG. 19

Utilizzare il WC con la sedia completamente frenata. Per l'utilizzo del WC estrarre la parte del sedile asportabile tirando la maniglia presente sulla parte anteriore (FIG. 18).

Estrarre il WC dalla parte posteriore afferrandolo per l'impugnatura (FIG. 19).

IMMAGINI A SCOPO ILLUSTRATIVO

11.11 Utilizzo

Per spingere la sedia comoda usare sempre e solo il maniglione posteriore, non spingere mai utilizzando altri appoggi. Prima di muoversi su una superficie inclinata assicurarsi delle proprie capacità e limiti. Consultare le tecniche di movimento con personale qualificato.

E' comunque raccomandata una assistenza per le superfici con una pendenza superiore al 10%. Se è necessario fermarsi su una superficie inclinata, evitare movimenti bruschi. Per rallentare in una discesa non usare i freni delle ruote. Non cambiare bruscamente la direzione in discesa. Per la discesa e la salita delle scale farsi sempre aiutare da una persona bloccando i freni della sedia comoda. Nel caso in cui due persone sollevino la sedia comoda, evitare di impugnarla in punti pericolosi per il paziente come pedane e braccioli, ma utilizzare solo il telaio e le impugnature posteriori.

- Uso delle ruote posteriori grandi

Le ruote posteriori grandi di 60 cm servono per condurre la carrozzina ad auto spinta. Per fare questo impugnare il corrimano presente sulla ruota e spingerlo nella direzione richiesta.



ATTENZIONE!

- Non fare pressione sui poggiatesta quando si sale o si scende dalla sedia.

12. MANUTENZIONE

I prodotti della linea MOPEdia by Moretti al momento dell'immissione in commercio sono controllati accuratamente e provvisti di marchio CE.

Per la sicurezza del paziente e del medico si raccomanda di far controllare dal produttore o da un laboratorio autorizzato, almeno ogni 2 anni, l'idoneità all'uso del vostro prodotto. In caso di riparazione devono essere utilizzati soltanto ricambi ed accessori originali.

- È estremamente importante che il dispositivo sia controllato al primo utilizzo. In particolare si prega di controllare che tutte le viti e bulloni siano ben stretti.
- Che le parti meccaniche del dispositivo siano in grado di muoversi correttamente (schienale, poggia gambe, braccioli, ruote, ecc...).
- Verificare i freni delle ruote per un corretto funzionamento.
- LE PARTI MECCANICHE (CERNIERE E PERNI) DEVONO ESSERE VERIFICATE MENSILMENTE E LUBRIFICATE CON UN GOCCIO DI OLIO AL FINE DI FAVORIRE LA SCORREVOLEZZA E LA RESISTENZA ALL'USURA.

Le sedie comode della linea MOPEdia by MORETTI necessitano di poche ed elementari manutenzioni periodiche, qui di seguito vi elenchiamo i controlli da effettuare periodicamente:

Elemento	Frequenza
Lubrificazione (perni, giunti, snodi, etc.)	Mensile
Capacità frenante	Mensile
Pulizia della tappezzeria del sedile	Secondo necessità
Verifica generale da parte di personale qualificato	Biennale

13. PULIZIA E DISINFEZIONE

13.1 Pulizia

Per pulire la sedia comoda, utilizzare esclusivamente un panno imbevuto di acqua ed asciugare con un panno pulito ed asciutto, o con acqua tiepida e sapone neutro.



ATTENZIONE!

Non usare sostanze abrasive, acidi, alcol, detersivi a base di cloro, disinfettanti ed acetone, perché tali sostanze provocano l'abrasione delle parti in plastica e l'arrugginimento delle superfici metalliche.

Il fabbricante non sarà responsabile per il danneggiamento causato dall'utilizzo di materiali che possano deteriorare la superficie del prodotto o da corrosivi chimici utilizzati durante la pulizia.

13.2 Pulizia del WC

Il WC deve essere regolarmente pulito e disinfettato utilizzando un normale disinfettante da bagno. Pulire sempre almeno prima di ogni uso.

13.3 Disinfezione

Se necessario, effettuare la disinfezione del prodotto utilizzando un delicato detersivo disinfettante.



ATTENZIONE!

I prodotti sanificanti sono corrosivi. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Indossare indumenti protettivi, guanti, occhiali protettivi e scarpe di sicurezza. In caso di contatto accidentale, lavare la parte interessata abbondantemente con acqua calda e consultare immediatamente un medico.

14. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO GENERALI

In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

15. CARATTERISTICHE TECNICHE

15.1 Dimensione e peso

Dimensione e peso															
Misure in cm															
RC221-38	93	53	44	112	72	54	44-54	38	60	58	35	29	25	12.5	12.5
RC221-40	93	53	44	112	72	54	44-54	40	60	60	35	31	25	12.5	12.5
RC221-43	93	53	44	112	72	54	44-54	43	60	63	35	34	26	12.5	12.5
RC221-46	93	53	44	112	72	54	44-54	46	60	66	35	37	26	12.5	12.5
RC221-48	93	53	44	112	72	54	44-54	48	60	68	35	39	26	12.5	12.5
RC221-50	93	53	44	112	72	54	44-54	50	60	70	35	41	27	12.5	12.5
RC221-55	93	53	44	112	72	54	44-54	55	60	75	35	46	27	12.5	12.5
RC225-38	93	53	44	112	72	54	44-54	38	60	58	35	29	25	12.5	12.5
RC225-40	93	53	44	112	72	54	44-54	40	60	60	35	31	25	12.5	12.5
RC225-43	93	53	44	112	72	54	44-54	43	60	63	35	34	26	12.5	12.5
RC225-46	93	53	44	112	72	54	44-54	46	60	66	35	37	26	12.5	12.5
RC225-48	93	53	44	112	72	54	44-54	48	60	68	35	39	26	12.5	12.5
RC225-50	93	53	44	112	72	54	44-54	50	60	70	35	41	27	12.5	12.5
RC225-55	93	53	44	112	72	54	44-54	55	60	75	35	46	27	12.5	12.5
RC230-38	94	53	44	112	72	54	44-54	38	60	62	35	29	25	20	20
RC230-40	94	53	44	112	72	54	44-54	40	60	64	35	31	25	20	20
RC230-43	94	53	44	112	72	54	44-54	43	60	67	35	34	26	20	20
RC230-46	94	53	44	112	72	54	44-54	46	60	70	35	37	26	20	20
RC230-48	94	53	44	112	72	54	44-54	48	60	72	35	39	26	20	20
RC230-50	94	53	44	112	72	54	44-54	50	60	74	35	41	27	20	20
RC230-55	94	53	44	112	72	54	44-54	55	60	79	35	46	27	20	20

Dimensione e peso															
Misure in cm															
RC240-38	118	50	44	114	75	57	44-54	38	60	65	35	29	25	60	20
RC240-40	118	50	44	114	75	57	44-54	40	60	67	35	31	25	60	20
RC240-43	118	50	44	114	75	57	44-54	43	60	70	35	34	26	60	20
RC240-46	118	50	44	114	75	57	44-54	46	60	73	35	37	26	60	20
RC240-48	118	50	44	114	75	57	44-54	48	60	75	35	39	26	60	20
RC240-50	118	50	44	114	75	57	44-54	50	60	77	35	41	27	60	20
RC240-55	118	50	44	114	75	57	44-54	55	60	82	35	46	27	60	20
RC245-38	100	50	44	114	75	57	44-54	38	60	64	35	29	25	20	60
RC245-40	100	50	44	114	75	57	44-54	40	60	66	35	31	25	20	60
RC245-43	100	50	44	114	75	57	44-54	43	60	69	35	34	26	20	60
RC245-46	100	50	44	114	75	57	44-54	46	60	72	35	37	26	20	60
RC245-48	100	50	44	114	75	57	44-54	48	61	74	35	39	26	20	60
RC245-50	100	50	44	114	75	57	44-54	50	61	76	35	41	27	20	60
RC245-55	100	50	44	114	75	57	44-54	55	61	81	35	46	27	20	60
RC250-38	98	53	44	144	72	54	44-54	38	60	62	35	29	29	20	20
RC250-40	98	53	44	144	72	54	44-54	40	60	64	35	31	29	20	20
RC250-43	98	53	44	144	72	54	44-54	43	60	67	35	34	30	20	20
RC250-46	98	53	44	144	72	54	44-54	46	60	70	35	37	30	20	20
RC250-48	98	53	44	144	72	54	44-54	48	60	72	35	39	30	20	20
RC250-50	98	53	44	144	72	54	44-54	50	60	74	35	41	32	20	20
RC250-55	98	53	44	144	72	54	44-54	55	60	79	35	46	34	20	20

*Le misure possono variare di ± 1 cm

15.2 Specifiche tecniche

- Telaio in acciaio verniciato a polveri;
- Pedane amovibili - Swing-away (non disponibili per RC245-XX);
- Poggia gambe regolabile in più posizioni;
- Poggia polpacci imbottito regolabile in più posizioni;
- Poggia piedi regolabile in più posizioni;
- Poggia schiena imbottito ± 10 cm;
- Poggia schiena regolabile da 0° a 35° gradi, parziale ritorno automatico tramite molla (*non disponibile per RC221-XX e RC250-XX);
- Poggia schiena regolabile da 0° a 90° gradi tramite leve per operatore (*solo per RC250-XX);
- Seduta ergonomica imbottita ± 10 cm;
- Braccioli imbottiti estraibili e ribaltabili;
- Seduta e schienale amovibile in pochi secondi tramite clip di fissaggio;
- Telaio dello schienale fissato tramite C-clip per una rapida pulizia e montaggio;
- Tessuto SKAI per una facile pulizia;
- Freni su 2 ruote (anteriori o posteriori);
- Peso Max consentito 135Kg (*per sedute:38-40-43-46-48);
- Peso Max consentito 180Kg (*per sedute:50 - 55);
- Ruote $\varnothing 125$ (*per RC221-XX e RC225-XX);
- Ruote $\varnothing 200$ in PU (*per RC230-XX e RC250-XX);
- Ruote posteriori $\varnothing 600$ mm e Ruote anteriori $\varnothing 200$ mm in PU (*per RC240-XX);
- Ruote posteriori $\varnothing 200$ mm e Ruote anteriori $\varnothing 600$ mm in PU (*per RC245-XX);
- Temperatura dell'ambiente operativo -20 C° / + 60 C°;
- Conservazione consigliata: Conservare in luogo fresco ed asciutto e comunque sempre lontano da fonti dirette di calore come la luce solare (temp. consigliata tra +10 C° / + 40 C°);
- Resistenza all'accensione: I materiali utilizzati per il rivestimento e l'imbottitura sono stati sottoposti a prova con metodi specificati nella EN1021-1/2;
- Rispetto della UNI EN 12182

16. ACCESSORI

- RCA100** Braccioli elevabili in altezza
- RCA110** Poggiatesta regolabile in altezza
- RCA111** Poggiatesta ergonomico regolabile in altezza e profondità
- RCA115** Divaricatore regolabile
- RCA120** Asta da flebo regolabile
- RCA125** Poggiaschiena e testa da 90cm
- RCA130** Pelottine toraciche
- RCA135** Porta bombola
- RCA140** Seduta imbottita ergonomica ± 10 cm senza foro per WC
- CBR500** Tavolino lineare
- CBR505** Tavolino sagomato
- CAR235** Kit monoguida (*RC240-XX; RC245-XX)
- RP245** Cintura di sicurezza tipo auto
- RP247** Cintura di sicurezza con fibbia a scatto
- RCR150** WC per comode

17. GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso.

Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso. Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale.

Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

18. RIPARAZIONI

18.1 Riparazione in garanzia

Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

18.2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia

Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

18.3 Prodotti non difettosi

Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

19. RICAMBI

I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio.

20. CLAUSOLE ESONERATIVE

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.

**CERTIFICATO DI GARANZIA**

Prodotto _____

Acquistato in data _____

Rivenditore _____

Via _____ Località _____

Venduto a _____

Via _____ Località _____



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com