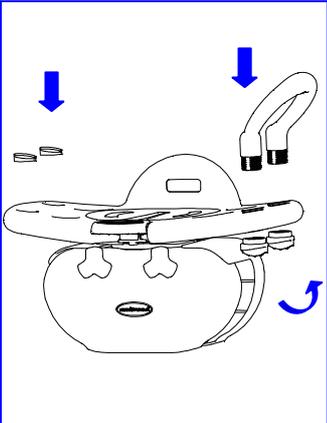
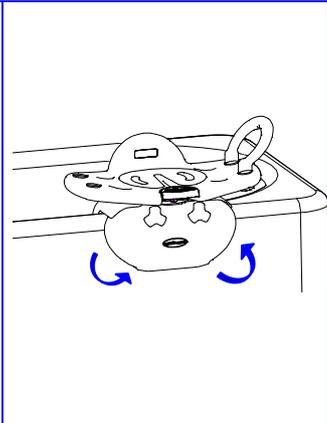


COD. 27732 SEDIA GIREVOLE CON MANIGLIA PER VASCA

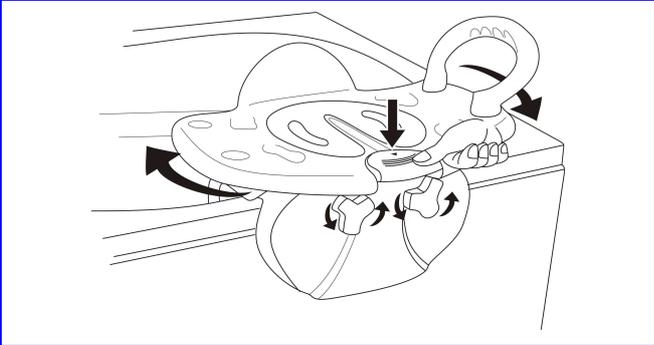
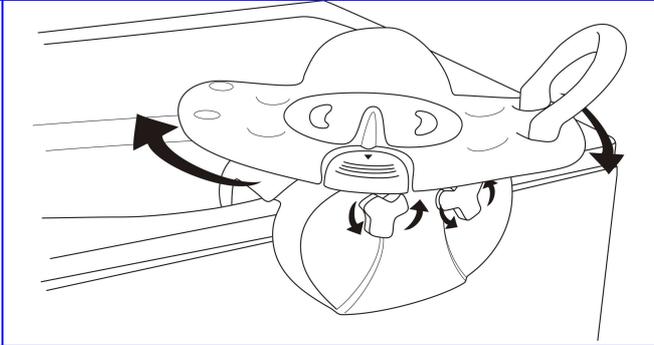
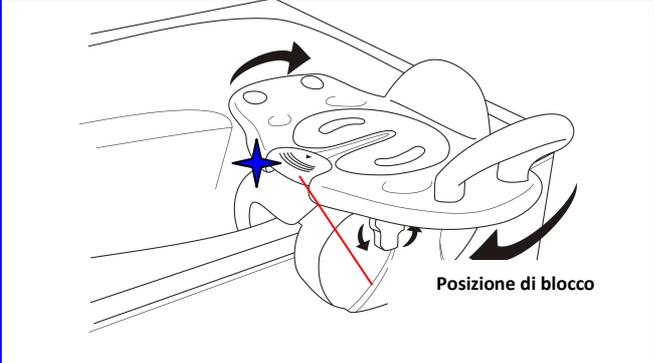
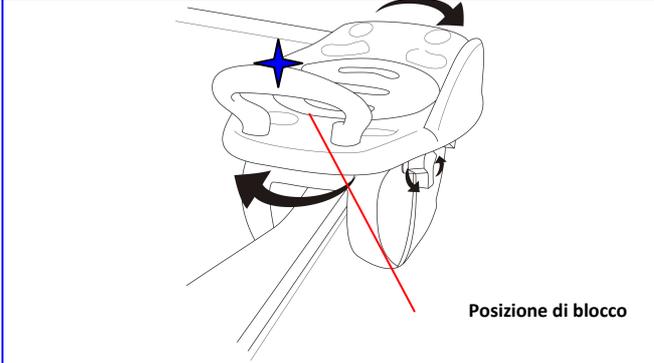
⚠ ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo foglietto illustrativo prima di utilizzare il prodotto.

- ▲ Controllare che la sedia vasca sia fissata saldamente prima dell'uso.
- ▲ Assicurarsi che la superficie di installazione sia pulita ed asciutta. In caso contrario la sedia potrebbe non aderire in modo sicuro alla vasca, questo potrebbe causare rischi all'incolumità dell'utente.
- ▲ La portata massima è pari a 110 kg.

ASSEMBLAGGIO / FISSAGGIO:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estrarre il prodotto dalla confezione. 2. Scegliere una estremità per assemblare la maniglia e posizionare i tappi sull'altro lato. 		<ol style="list-style-type: none"> 3. Allentare il dispositivo di fissaggio. Posizionare perpendicolarmente la barra della sedia alla parete della vasca e bloccare il dispositivo di fissaggio.
--	---	---	---

MODO D'USO:

	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sedersi afferrando con una mano la maniglia. 2. Spingere la linguetta verso il basso e girare il sedile posto nella parte superiore. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Girare verso destra o sinistra impugnando con una mano la maniglia.
 <p>Posizione di blocco</p>	 <p>Posizione di blocco</p>
<ol style="list-style-type: none"> 4. Attivare la posizione di blocco con il sedile parallelo alla vasca. 5. Posizionare le gambe nella vasca da bagno. 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Spingere la linguetta e girare. 7. Afferrare la maniglia e calarsi lentamente nella vasca da bagno.

GIMA S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) - Italy
www.gimaitaly.com



ITALY
tel. 199 400 401
fax 199 400 403
gima@gimaitaly.com



Fabbricante/Manufacturer:
GIMA S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Made in P.R.C.