

 Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it	SCHEDA TECNICA GRUCCE ASCELLARI	Rev 01 Ottobre 2010
--	---	---

Codice	Descrizione
AD-26N	Grucce ascellari adulto
AD-26X	Grucce ascellari extra adulto
AD-26Y	Grucce ascellari bambino

Descrizione

Grucce ascellari regolabili a 9 differenti livelli d'altezza con appoggi sottoascellari in PVC morbido estraibili. Impugnature ergonomiche a 5 posizioni rivestite PVC morbido. Puntali in gomma. La particolarità del dispositivo risiede nel fatto che il puntale di regolazione in altezza è costituito da un doppio tubo in alluminio.

Portata 120 kg

Precauzioni

- Consultare sempre il medico o il rivenditore per una corretta regolazione e per un uso adeguato del dispositivo.
- Non conservare all'aperto ed evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Attenzione: non lasciare il dispositivo in automobile in caso di elevata temperatura esterna.
- Controllare attentamente tutte le parti del dispositivo - clip di fissaggio, tubi, puntali ed impugnature.
- Controllare regolarmente il corretto posizionamento delle clip di fissaggio.
- Impugnare fermamente il dispositivo durante l'utilizzo.
- In caso di perdita d'equilibrio, lasciare prontamente il dispositivo in modo da non cadervi sopra.
- Le parti regolabili di ambedue le stampelle devono essere fissate allo stesso livello d'altezza in modo da garantire stabilità al dispositivo. In caso di dubbio, rivolgersi al rivenditore.
- Spostarsi sempre lentamente ed a piccoli passi per garantire un corretto bilanciamento del peso corporeo e per evitare perdite d'equilibrio.
- Non utilizzare su superfici bagnate o ghiacciate.
- Non utilizzare il dispositivo su gradini.
- Utilizzare il dispositivo soltanto come ausilio per la deambulazione ed evitare qualsiasi altro uso improprio.
- Rispettare sempre la portata massima.
- Prima dell'utilizzo, verificare sempre il corretto posizionamento delle clip di fissaggio e la stabilità sul terreno del dispositivo.
- Non appendere o appoggiare alcun oggetto al dispositivo.
- Non modificare in alcuna parte il dispositivo. In caso di necessità, utilizzare soltanto parti di ricambio originali. Solo personale qualificato è abilitato alla riparazione del dispositivo.
- Dopo un lungo periodo di non utilizzo, provvedere sempre alla verifica del dispositivo da parte di personale qualificato.
- Durante l'uso, prestare particolare attenzione a buche e deformazioni del terreno.

Dati tecnici

Codice AD-26Y	Grucce ascellari bambino per altezze utilizzatore da 137 a 157 cm. Regolazione in altezza da 95 a 115 cm.
Codice AD-26N	Grucce ascellari adulto per altezze utilizzatore 157 a 178 cm. Regolazione in altezza da 114 a 134 cm.
Codice AD-26X	Grucce ascellari adulto extra per altezze utilizzatore da 178 a 198 cm. Regolazione in altezza da 133 a 153 cm.

Materiali

La struttura del dispositivo è realizzata in alluminio anodizzato con componenti in materiale plastico e PVC.

 Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it	SCHEDA TECNICA GRUCCE ASCELLARI	Rev 01 Ottobre 2010
---	---	---

Preparazione per l'uso

Solo personale qualificato può procedere all'adeguata regolazione del dispositivo e dare indicazioni circa il suo corretto utilizzo. Un'errata regolazione dell'altezza e degli appoggi sottoascellari o un uso improprio possono determinare una perdita d'efficacia del dispositivo, degli sforzi eccessivi per il paziente e, persino, il rischio di caduta.

Il dispositivo deve essere predisposto all'uso da personale qualificato a seconda delle specifiche necessità di ciascun paziente.

Pulizia

Pulire con panno morbido e detergenti neutri.
Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.
Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Codice nomenclatore 12.03.12.003

Codice CND: Y120312

Progressivo di registrazione: 320061

Produttore **INTERMED Srl**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE