

| Codice | Descrizione |
|-----------------------|--|
| PRACTICA II 41 | Carrozzina ad autospinta con braccioli ribaltabili misura 41 |
| PRACTICA II 43 | Carrozzina ad autospinta con braccioli ribaltabili misura 43 |
| PRACTICA II 45 | Carrozzina ad autospinta con braccioli ribaltabili misura 45 |
| PRACTICA II 51 | Carrozzina ad autospinta con braccioli ribaltabili misura 51 |

Descrizione ed indicazioni

Carrozzina ad autospinta con **telaio in acciaio a doppia crociera** e **braccioli desk ribaltabili e regolabili in altezza** indicata per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione traumatica o congenita della funzionalità degli arti inferiori. **Ruote posteriori piene ad estrazione rapida e ruotini per passaggi stretti. Fascia ferma tallone. Freni regolabili in alluminio. Maniglie di spinta in PU morbido. Colore grigio metallizzato.** Disponibile nelle misure 41, 43, 45 e 51 cm.

Materiali componenti

| | |
|--------------------|--|
| Telaio e braccioli | Acciaio |
| Pannello braccioli | Plastica |
| Poggia-braccio | Nylon imbottito |
| Seduta e schienale | Nylon imbottito |
| Ruotini anteriori | 200 mm con spessore 5 cm in PU morbido |
| Ruote posteriori | 600 mm in PU morbido |
| Poggiapiedi | Plastica |

Dati tecnici

| Seduta | Larghezza totale | Altezza seduta da terra | Peso |
|--------------|------------------|-------------------------|-------|
| 41 cm | 60 cm | 51 cm | 21 kg |
| 43 cm | 62 cm | 51 cm | 21 kg |
| 45 cm | 64 cm | 51 cm | 21 kg |
| 51 cm | 70 cm | 51 cm | 21 kg |

| | |
|------------------------|--------------------|
| Portata | 120 kg |
| Diametro tubi telaio | 22 mm |
| Diametro tubi crociera | 26 mm |
| Ruote posteriori | 24" |
| Ruote anteriori | 8" con spessore 2" |

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Per un corretto utilizzo del dispositivo, consultare le "Istruzioni per l'uso".

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Manutenzione e pulizia

Sono necessari controlli periodici per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente.

| | |
|--------------|---|
| Freni | Verificare lo stato dei tamponi, eventuali movimenti di gioco e l'efficacia della frenata. |
| Tele | Verificare la tensione e lo stato generale facendo particolare attenzione alla presenza di tagli o strappi. |
| Ruote | Verificare lo stato di usura dei pneumatici. Le forcelle delle ruote anteriori devono essere ben fissate al telaio e ruotare facilmente. I perni ad estrazione rapida delle ruote posteriori devono infilarsi facilmente nella loro sede e non devono avere gioco sul diametro. |

| | |
|---------------------|--|
| Mancorrenti | Verificare lo stato di usura ed il fissaggio. |
| Braccioli | Verificare lo stato delle imbottiture. Il bracciolo deve restare ben fissato senza gioco laterale. |
| Poggia-piedi | Verificare che le pedane non presentino rotture e che siano ben fissate ai supporti metallici. |
| Bulloneria | Verificare il corretto fissaggio e la tenuta di viti e bulloni. |

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione.

La garanzia non è applicabile a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl ed alle parti soggette ad usura.

Codice CND Y122106
Progressivo di registrazione 315599

Produttore INTERMED srl

Accessori

P-20 Pedane elevabili
P-25 Sedile wc misura 41-43
P-26 Sedile wc misura 45-51
P-27 Sedile rigido misura 41-43
P-28 Sedile rigido misura 45-51



Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE