

TUBI ENDOTRACHEALI

Manuale d'uso:

CON CUFFIA

1. Sgonfiare completamente la cuffia prima di procedere con l'intubazione.
2. Dopo aver terminato l'intubazione, gonfiare la cuffia utilizzando la quantità minima d'aria necessaria a fornire una perfetta aderenza alla parete tracheale.
3. Auscultare immediatamente entrambi i polmoni dopo il gonfiaggio della cuffia. Nel caso si verifichi una diminuzione d'intensità sonora durante l'auscultazione occorre posizionare adeguatamente il tubo endotracheale.
4. Il corretto posizionamento del tubo endotracheale dovrebbe essere verificato, osservando l'estremità dello stesso, con una radiografia toracica.

SENZA CUFFIA

1. Il corretto posizionamento del tubo endotracheale dovrebbe essere verificato, osservando l'estremità dello stesso, con una radiografia toracica.
2. Auscultare entrambi i polmoni. Nel caso si verifichi una diminuzione d'intensità sonora durante l'auscultazione occorre posizionare adeguatamente il tubo endotracheale.

Avvertenze:

1. Monouso.
2. Non utilizzare se il confezionamento è aperto o danneggiato.
3. Non sterilizzare nuovamente.
4. Conservare in un luogo fresco e asciutto.
5. Non esporre ai raggi solari.



Well Lead Medical Co., Ltd.

C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong, 511434 Panyu, Guangzhou, P.R.C.



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany