

Ortesi rigida a stivaletto per tibio-tarsica corta

AGILE SHORT® art. TO4306

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico, leggero e confortevole, garantisce la necessaria stabilizzazione dell'articolazione tibio-tarsica. La struttura caratterizzata da materiali plastici, resistenti e leggeri, garantiscono un'ottima tenuta latero-mediale.

Adattabile a qualsiasi conformazione anatomica, risulta di facile applicazione.

CARATTERISTICHE

Struttura in materiale composito leggero e resistente. Aste montanti per stabilizzazione latero-mediale conformate anatomicamente. Imbottitura traspirante, bi-foderata in gomma schiuma, rivestita da velour di cotone. Imbottitura plantare in Evazote® atossica ammortizzante. Cinturini di chiusura a velcro. Suola in gomma antiscivolo.

Il minore ingombro in altezza rende adatto il prodotto per l'applicazione nei casi in cui sia necessario ridurre l'invasività del tutore o per particolari conformazioni anatomiche.

INDICAZIONI

ROTTURA DEL TENDINE D'ACHILLE • DISTORSIONI GRAVI FINO AL III GRADO • TRATTAMENTO DELLE FRATTURE MALLEOLARI • SOSTITUTIVO DEL GESSO • POST – OPERATORIO

APPLICAZIONE

- 1 Aprire i cinturini a velcro di chiusura.
- 2 Indossare l'imbottitura.
- 3 Infilare la gamba all'interno della struttura plastica.
- 4 Stringere i cinturini di chiusura partendo da quello più basso (piede).
- 5 Rimuovere le bande di protezione per consentire al velcro di agganciare le aste montanti.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente.

Asciugare lontano da fonti di calore.

Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire.

Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro; risciacquare accuratamente.

Asciugare lontano da fonti di calore.

Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire.

Non disperdere nell'ambiente.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro.

L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento.

Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico.

Si consiglia l'uso personale del prodotto.

Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili.

Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.