

IMMOBILIZZATORE DEL POLSO

Art. 031

Tutore di supporto, protezione e immobilizzo del polso che assicura il blocco completo dell'articolazione. Completamente apribile è facile da indossare, personalizzabile e adattabile alle esigenze individuali di ogni paziente.



Indicazioni

- Patologie Traumatiche: distorsioni-fratture distali del radio-tendiniti.
- Patologie Degenerative: rizoartrosi-sindrome del tunnel carpale-osteoartrosi-artrosi-artrite guttosa acuta-artrite reumatoidea.
- Fase Riabilitativa: scarico del muscolo tendineo post-trauma e post-operazione.

Caratteristiche

Dotato di 3 aste anatomiche, modellabili a freddo, per adattarle alle esigenze individuali e garantire il blocco completo dell'articolazione. Avanzato sistema di doppia chiusura brevettato da Pavis. Con la prima asola si effettua, la prima chiusura attorno al polso, con i tiranti supplementari si perfeziona la stessa e si personalizza la tensione desiderata per ottenere il massimo comfort. Colore blu.




Benefici

Già preparata destra o sinistra, può essere comunque adattata sull'altra mano invertendo semplicemente l'asta palmare con quella dorsale.

Componenti specifici


Lo strato a contatto con la pelle è costituito da un velluto di cotone 100%, confortevole al tatto, che garantisce alla pelle libera traspirazione. Lo strato esterno è costituito da una maglia di nylon resistente sulla quale aderiscono perfettamente le bande di velcro utilizzate per il sistema di chiusura.

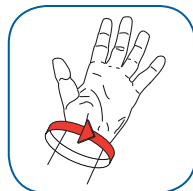

New EDGE[®]
LINE

Size	SMALL	REG	EXTRA
Circonferenza del polso (ambidestro) CM	13,5-16	16-18,5	18,5-21

TOTAL BLU

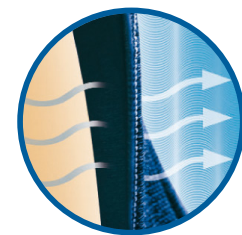

100% COTONE
SULLA PELLE

IMMOBILIZZATORE DEL POLSO
Art. 031

Come si indossa

Indossare a contatto della pelle, osservando le figure e le seguenti istruzioni:

- inserire le aste nelle apposite tasche A e B (fig. 1): se la mano è DESTRA in A l'asta DORSAL e in B l'asta PALMAR; se la mano è SINISTRA in A l'asta PALMAR e in B l'asta DORSAL
- agganciare la prima banda C tramite l'apposito velcro ed infilare la mano (fig. 2)
- chiudere il velcro lungo, intorno al polso (fig. 3)
- prendere uno alla volta i due velcri del sistema a stringhe tirarli e chiuderli, regolando la tensione desiderata (fig. 4).

