

**INTERMED**

Via della Pace, 21
20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361
www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

SCHEDA TECNICA
VASSOIO DA LETTO
CON PIANO INCLINABILE
Codice 7302

Rev 02**Dicembre 2010****Indicazioni**

Vassoio da letto con piano inclinabile in tre posizioni con funzioni di portavivande, leggjo e portaoggetti.

Istruzioni per l'uso

Utilizzare il vassoio con le gambe completamente aperte verso l'esterno.

Avvertenze

Non sedersi sul tavolino o farne uso diverso da quello previsto.

Non far cadere oggetti appuntiti sul piano.

Non lasciare esposto il prodotto alle intemperie.

Composizione

Struttura Piano in truciolare ecologico nobilitato con bordatura melaminica monostrato EA
Gambe ripiegabili in acciaio
Finitura Piano bianco verniciato antigraffio
Gambe ripiegabili verniciate con polveri epossidiche colore nero

Dimensioni 60 x 40 x 24 cm

Peso 3,2 kg

Pulizia e manutenzione

Strofinare con un panno umido o lavare con acqua e sapone, utilizzando normali detergenti.

Non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi, vapore o solventi.

Conservazione e smaltimento

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione 1 pezzo

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Produttore **Valsecchi S.p.A.**